



Le poste de consultation d'infirmière NCS ZETTLER®

Communication ciblée pour le service des soins

Dans des hôpitaux et des maisons de soins, le personnel doit toujours pouvoir réagir spontanément à des situations d'urgence. Cela exige un fonctionnement irréprochable du système de communication et une information permanente sur les lieux où se trouve le personnel soignant. Le système de communication ZETTLER® Medical® 800 répond à ces exigences grâce au nouveau poste de consultation d'infirmière NCS.

Le poste de consultation d'infirmière NCS est le développement conséquent des terminaux et postes de consultation conventionnels et peut être utilisé comme terminal de groupe, terminal de station et terminal parallèle universel dans les chambres de service et autres locaux du personnel. Le personnel peut consulter les appels reçus en mode discrétion via un écouteur ou bien en mode mains-libres, échanger les informations nécessaires et appliquer les mesures correspondantes.

Traitement confortable des appels

Un afficheur clair et rétro éclairé indique tous les appels, les alarmes ainsi que les présences actuelles du personnel soignant. Tous les appels sont signalés par voie acoustique et optique et peuvent être gérés selon des priorités prédéfinies ou suivant une sélection individuelle. Le volume sonore des renvois d'appel dans les chambres de patients et de la signalisation acoustique au niveau du terminal est réglable, par exemple pour le service de jour et de nuit.

tyco

*Fire & Integrated
Solutions*

Affectation personnalisée des touches

Huit boutons avec voyant d'état pour des fonctions particulières sont à disposition. Avantage particulier : les fonctions utilisées fréquemment, normalement activées en passant par différentes commandes de menus, peuvent être affectées à des touches d'appel direct. Les interventions régulières, par ex. le déclenchement d'un appel d'urgence et l'actionnement d'un ouvre-porte, sont pré-affectées en standard. Le personnel soignant peut facilement adapter l'affectation des touches.

Communication directe et annonces

Le travail du personnel soignant est simplifié également grâce à la possibilité de pouvoir communiquer avec les patients et les collègues à l'endroit indiqué sur l'affichage. Les patients contactés peuvent annuler la fonction anti-écoute en actionnant le bouton d'appel et répondre au personnel soignant qui, sans commande additionnelle, peut communiquer en mode mains-libres. Il est également possible de lancer rapidement et de manière ciblée des annonces internes, des annonces de station et de groupe ainsi que des annonces destinées à des locaux où se trouve le personnel soignant.

Fonctions de commande supplémentaires

Les fonctions de commande telles que la télécommande d'interphones de portes et de portails d'accès peuvent être intégrées dans le système de communication Medical®. Les interphones de portes séparés deviennent superflus et le poste de travail dans la chambre de service est plus ordonné. Par ailleurs, il est possible de réceptionner et d'acquiescer des messages de défauts internes et des messages externes, par ex. d'installations de détection de dangers - un critère important pour la sécurité au sein de l'hôpital.

Assistance pour le service des soins

Le poste de consultation d'infirmière NCS assiste également la gestion des stations et des bâtiments : il est possible d'organiser jusqu'à 15 stations et jusqu'à 5 groupes de soins par station. En fonction des horaires de service, il est possible de sélectionner rapidement la station souhaitée à partir de plusieurs variantes d'interconnexion. Les groupes de soins et les stations d'une équipe de service sont regroupés automatiquement et opèrent comme une seule unité de soins.

Le choix correct pour chaque application

Suivant la taille et le type d'organisation d'un hôpital ou d'une maison de soins, il convient de disposer de différentes possibilités d'appel et de consultation. Outre le poste de consultation d'infirmière NCS, la société Tyco offre d'autres alternatives. Les **terminaux de chambre** des unités de commande ZETTLER® satisfont à toutes les exigences de base d'un terminal : la prise d'appel, la mise en attente ou l'effacement de l'appel.

La **variante universelle** du **poste de consultation** - avec afficheur et combiné - permet une installation modulaire et convient parfaitement pour les chambres de service et les centres d'assistance.



Terminal PC optionnel avec écran tactile : activation simple et aisée de chaque fonction par simple pression du doigt.

Le personnel soignant est constamment en déplacement et donc équipé d'appareils mobiles DECT. En combinaison avec une installation de télécommunication, ces **téléphones mobiles** peuvent également être utilisés comme poste de consultation d'infirmière portable. La solution la plus confortable : les **terminaux PC** pour chambres de station et centrales de communication. Les outils mis en réseau, par ex. enregistrement, plans de situation intégrés, organisations PSA et DECT et autres, assistent tous les domaines du service des soins et offrent des interfaces pour les systèmes de gestion des bâtiments et systèmes de sécurité.

Pour de plus amples informations concernant les produits et les prestations de Tyco, veuillez contacter votre agent de vente ou visiter notre site : www.tycofireandsecurity.com

Tyco se réserve le droit de modifier ou de supprimer tout produit ou service sans préavis.

Visa de société:

tyco
Fire & Integrated
Solutions